



Hygiene & Pflege

innen
rein,
außen
rein



assistina 3X3

Assistina 3x3: perfekte Reinigung innen und außen

assistina 3X3

Ihre Vorteile auf einen Blick

- > Automatische Innenreinigung
- > Automatische Außenreinigung
- > Perfekte Schmierung der Instrumente
- > Kurze Zykluszeit
- > Einfache Bedienung
- > Optimales Preis- / Leistungsverhältnis

Der Gesamtprozess*


1. Innenreinigung der Spraykanäle und Getriebeteile, Außenreinigung des Instruments



2. Durchblasen der Spraykanäle und Getriebeteile mittels Druckluft



3. Schmierung der Getriebeteile mit W&H Service Oil F1

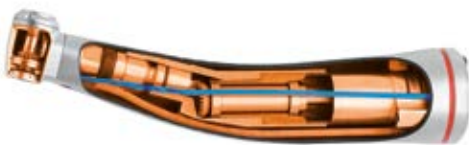

* Entspricht der Empfehlung des Robert Koch Institutes (RKI) sowie der Swissmedic.

Assistina 3x3
3 Instrumente x 3 Aufbereitungsschritte:
Innenreinigung, Außenreinigung, Ölpflege

Nie wieder Instrumente mit der Hand reinigen

Ab sofort können Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Ihre Patienten. Denn die zeitaufwändige Vorbereitung zum Beispiel von Hand- und Winkelstücken und Turbinen auf die Sterilisation übernimmt die Assistina 3x3 automatisch.



Innenreinigung

Die gründliche Reinigung aller Getriebeteile und Spraykanäle unterstützt die volle Funktionsfähigkeit der Instrumente.



Außenreinigung

Die Beseitigung organischer Ablagerungen vor der Sterilisation dient der Sicherheit Ihrer Patienten und Ihrer Praxismitarbeiter.



Perfekte Ölpflege

Die präzise automatische Schmierung aller Getriebeteile verlängert die Lebensdauer Ihrer Instrumente.



Rekordzeit

Die kurze Zykluszeit von rund sechs Minuten verkürzt die gesamte herkömmliche Aufbereitungszeit Ihrer Instrumente.



Einfache Bedienung

Die Assistina 3x3 funktioniert selbsterklärend, die Aufbereitung erfolgt auf Knopfdruck. Ganz ohne Schulungsaufwand.



Preis- / Leistungsverhältnis

Höchster Wirkungsgrad der Reinigung bei geringen Anschaffungskosten und äußerst sparsamem Verbrauch.

Assistina 3x2: die perfekte Innenreinigung

assistina 3x2

Ihre Vorteile auf einen Blick

- > Automatische Innenreinigung
- > Ohne Außenreinigung
- > Perfekte Schmierung der Instrumente
- > Kurze Zykluszeit
- > Einfache Bedienung
- > Optimales Preis- / Leistungsverhältnis



Assistina 3x2
3 Instrumente x 2 Aufbereitungsschritte:
Innenreinigung, Ölpflege

Erwecken Sie das Bild zum Leben:
hier und jetzt

Durch W&H Augmented Reality (AR)
werden reale Welt und virtuelle Welt
vereint – ein einzigartiges Erlebnis.
Die Zukunft beginnt heute!



Das Bild kann mehr, als man
ihm ansieht: Es lässt sich zum
Leben erwecken!

Laden Sie gratis die App »W&H AR« von
Google Play (für Android) oder vom Apple
App Store auf Ihr Smartphone oder Ihren
Tablet PC. Öffnen Sie die App und halten
Sie Ihr Gerät in einem Abstand von 50 cm
über das Bild!

Technische Daten



QR-Code mit dem
Mobiletelefon scannen
und mehr über
Assistina erfahren

Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der gezeigten
Zubehöerteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Assistina	3x3	3x2
Prozess:	Innen- und Außenreinigung, Ölpflege	Innenreinigung, Ölpflege
Geeignet für:	Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Luftmotoren und luftbetriebene Zahnsteinentfernungs-Instrumente	
Netzspannung:	100 – 240 V	
Max. Leistungsaufnahme:	40 VA	
Luftverbrauch:	ca. 100 NI/min.	ca. 60 NI/min.
Betriebsdruck:	5 – 10 bar (Regelung durch eingebauten, automatischen Druckregler)	
Höhe / Breite / Tiefe:	358 x 207 x 397 mm	
Füllmenge:	1.000 ml W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml W&H Service Oil F1, MD-200	

Genaue Angaben zu den verschiedenen Assistina 3x3 / 3x2 Adaptern finden Sie unter wh.com



Per Gutachten validiert

Die Validierung des Prozesses ist per Gutachten bestätigt und kann unter wh.com eingesehen werden.

W&H Service Oil F1

Die optimale Ölpflege für Getriebeteile erhöht die Lebensdauer zahnmedizinischer Präzisionsinstrumente.

W&H Activefluid

Reinigungslösung zur gründlichen Innen- und Außenreinigung von Instrumenten.

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4
83410 Laufen, Deutschland
t + 49 8682 8967-0
f + 49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 60
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-239
f + 43 6274 6236-890
office@wehadent.at
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com